

Compat ella®

Mobile enterale Ernährungspumpe

Die Compat Ella® ist eine neue, innovative, mobile enterale Ernährungspumpe mit benutzerfreundlichem Farbdisplay mit Sprachauswahl.

Funktionen auf einen Blick

- Kontinuierliches oder Intervall-Programm mit Förderraten von 1 ml / h bis 600 ml / h, mit oder ohne Zielvolumenvorgabe von 1 ml bis 4000 ml
- Förderrate und verabreichtes Volumen können jederzeit bei laufender Pumpe abgelesen werden

Einfach zu erlernen und zu verstehen

- Farbdisplay mit leicht verständlichen Symbolen für Pumpenstatus, Batteriestand und Alarm
- Übersichtliche U-förmige Tastatur mit intuitiv verständlichen Symbolen
- Bildschirm-Volltext-Zeile mit Infos zum Pumpenstatus, Anweisungen zur Programmierung und Anzeige von Fehlermeldungen

Genau und sicher

- Okklusionsalarm für Zu- und Abfluß und „Luft im Set“ Alarm
- +/- 5 % Fördergenauigkeit
- **AAFF Technologie:** Auto-Anti-Free-Flow Technologie zur Patientensicherheit
- Verschiedene Anzeigen für verabreichtes Volumen (aktuelle Applikation & Gesamtvolumen)
- Tastensperre, um unbeabsichtigte Veränderungen bei der Applikation zu vermeiden

Robust

- 5-Jahres-Wartungsintervall
- Pumpe kann unter fließendem warmen Wasser gereinigt werden

Mobil

- Leicht und mobil, kann in jeder Position betrieben werden
- 24 Stunden Akkudauer bei einer Förderrate von 125 ml / h

Erweiterte Funktionen

- PDMS-Verbindung (Patient Data Management Systems)
- Intervall-Programm verabreicht definiertes Volumen zu spezifischen Intervallen
- Applikationsvorgaben-Sperre, sodass Einstellungen nicht verändert werden können
- 30-Tage-Ernährungsverlauf



Verpackung Compat Ella® Pumpe

- Compat Ella® Pumpe
- Netzstromkabel
- Schraubhalterung
- Bedienungsanleitung

Compat Ella® Überleitsets

- Compat Ella® Spike Set
- Compat Ella® Universal Set
- Compat Ella® Combiset 1,5 l

Compat Ella® Zubehör

- Rucksack für Kinder und Erwachsene
- Kleiner Tischständer
- PDMS Kabel
- Schwesternrufkabel

Bestellinformationen

Produktname	Artikelnummer	Anzahl / VE
Compat Ella® Pumpe	12272020	1

Kennen Sie Compat Ella®?

Mobile enterale Ernährungspumpe

Eigenschaften der Pumpe

Fördergenauigkeit: +/- 5 %.

AAFF: Auto-Anti-Free-Flow Technologie.

Tastatur: Ergonomische, U-förmige Tastatur mit leicht verständlichen Symbolen.

Bildschirm: Farbdisplay zur Anzeige des Pumpenstatus.

Sprachen definierbar durch den Benutzer:

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Norwegisch, Tschechisch, Slowakisch, Portugiesisch und Polnisch.

Programm „Kontinuierlich“: Kontinuierliche Applikation. Mit oder ohne Zielvolumenvorgabe.

Förderrate: 1 ml / h bis 600 ml / h in 1 ml-Schritten.

Zielvolumenvorgabe: 1 ml bis 4.000 ml in 1 ml-Schritten.

Alarmer: Luft im Set, Okklusionsalarm für Zu- und Abfluß, Tür offen, kein Set, Zielvolumen erreicht, Pumpe wartet, Akkustatus.

Verabreichtes Volumen: Verabreichtes Volumen bei der aktuellen Ernährungsapplikation, kann durch Anwender auf 0 zurückgestellt werden.

Gesamtvolumen: Verabreichtes Gesamtvolumen zeigt das gesamte verabreichte Volumen seit dem letzten Löschen, kann durch den Anwender auf 0 zurückgestellt werden.

30-Tage-Ernährungsverlauf: Verabreichtes Gesamtvolumen für jeden Tag über die letzten 30 Tage.

Einstellungen: Alarmlautstärke, Hintergrundbeleuchtung, Dimmfunktion, Alarm bei Applikationsende (ja/nein), Tastensperre (ein/aus).

Befüllen des Überleitsets: Automatisch (17 ml), auch manuell möglich.

Erweiterte Funktionen

Programm „Intervall“: Verabreichung von spezifischen Bolusmengen in ml zu spezifischen Intervallen. Bolus von 1 ml bis 2.000 ml. Das Intervall kann von 15 Minuten bis 12 Stunden eingestellt werden, mit oder ohne Zielvolumenvorgabe.

Sperre für Programm „Intervall“: Das Programm „Intervall“ ist für den Benutzer nicht zugänglich.

Sperre für Applikationsvorgaben: Sperrt alle aktuellen Einstellungen, um zu verhindern, dass Patient oder Angehörige die Einstellungen verändern.

Datum: Datum und Uhrzeit einstellbar.

Kommunikation: PDMS oder Schwestern-Ruf. Compat Ella® kann an PDMS-Systeme angeschlossen werden, die meist auf Intensivstationen eingesetzt werden – so kann die Ernährungsapplikation beim Patienten automatisch überwacht werden. Der Anschluss erfolgt via serielltem Kabel. Spezifische Software-Treiber sind für jedes System erhältlich.

Garantie und Wartung

Garantie: 2 Jahre.

Wartung: alle 5 Jahre. Das Gerät darf nur durch autorisierte Medizintechniker gewartet werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Nestlé Health Science-Vertreter oder einen von Nestlé autorisierten Service-Partner.

Pumpenspezifikationen

Gewicht: 499 g.

Akku: Li-Ion. Läuft bis zu 24 Stunden bei 125 ml / h mit Wasser. 6 Stunden Aufladezeit.

Maße: L: 140 mm x B: 140 mm x H: 62 mm.

Lagerung: Bei Raumtemperatur lagern. Vor Sonnenlicht und Feuchtigkeit schützen.

Geräteklassifikation: Klasse IIa.

Mechanische Einwirkung und Flüssigkeitseintritt: IP25.

CE-Kennzeichnung: Erfüllt die Europäische Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/EWG. Eine CE-Zertifizierung wurde durch eine akkreditierte benannte Stelle ausgestellt: TÜV Rheinland.

Grüner Punkt: zeigt an, dass Nestlé Health Science seine Verantwortung als Hersteller wahrnimmt und das Recycling finanziell unterstützt.

Weitere Details in der Compat Ella® Gebrauchsanweisung oder auf Anfrage.